



ALKOHOLNI ROBČKI ZA HITRO RAZKUŽEVANJE POVRŠIN

Incidin™ Alcohol Wipe

ROBČKI ZA UČINKOVITO RAZKUŽEVANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN DRUGIH POVRŠIN, PRIPRAVLJENI ZA UPORABO.

Odsotnost aktivnih ostankov v kombinaciji s širokim spektrom učinkovitosti in kratkim kontaktnim časom. Naredijo Incidin™ Alcohol Wipe primerne za uporabo v zdravstvenih ustanovah. Zagotavljajo odličen učinek razkuževanja, ki je zahtevan za omejitev širjenja patogenov v zdravstvenih ustanovah.

Robčki Incidin™ Alcohol Wipe zagotavljajo:

- Širok spekter učinkovitosti vključno proti Norovirusom v kombinaciji s kratkim kontaktnim časom delovanja.
- Potrjena in zagotovljena učinkovitost sredstva, s katerim so prepojeni robčki.
- Visoko kvaliteten material s strukturirano površino robčka zagotavlja učinkovito uporabo.
- Odlična kompatibilnost z materiali, ki so odporni na alkohol.
- Brez barve in vonja.



Incidin™ Alcohol Wipe

Robčki za učinkovito razkuževanje medicinskih pripomočkov in drugih površin, pripravljeni za uporabo.

PREDNOSTI INCIDIN™ ALCOHOL WIPES

Širok spekter učinkovitosti, vključno proti Norovirusom v kratkem kontaktnem času: širok spekter delovanja omogoča vsakodnevno uporabo. V kombinaciji s kratkim kontaktnim časom delovanja zagotavlja hitro razkuževanje. Sredstvo, s katerim so robčki prepojeni, zagotavlja učinkovitost na površinah.

Prijazno uporabniku: priročni alkoholni robčki za hitro razkuževanje površin, brez predhodne priprave, na voljo v različnih pakiranjih.

Kompatibilnost s široko paleto materialov: odlična kompatibilnost z materiali, ki so odporni na alkohol, primerno za zdravstvene ustanove.

UČINKOVITOST

UČINKOVITOST (nerazredčeno)	ČAS DELOVANJA
Razkuževanje površin po VAH metodi 2019 (vklj. EN 16615)	
z mehanskim delovanjem (baktericid, levurocid, tuberkulocid) čisti in umazani pogoji	5 min
EN norms (čisti & umazani pogoji)	
EN 16615 (baktericid, levurocid)	1 min
EN 13727 (baktericid)	1 min
EN 13624 (levurocid)	1 min
EN 14348 + EN 16615 (metoda) (tuberkulocid)	1 min
EN 14476 (virusi z ovojnico)	30 sek
EN 14476 (omejeno virucid)	5 min
EN 14476 Noro (MNV) / Adeno	5 min
EN 14476 Polyoma / SV 40	10 min
EN 14476 Rota	30 sek
Učinkovitost skladno z DVV / RKI smernicami	
Učinkovit na viruse z ovojnico (vključno s HIV, HBV, HCV) po priporočilu RKI 01/2004*	30 sek
Omejeno virucidno delovanje plus*	10 min
Adeno*	10 min
Noro*	10 min
Rota*	30 sek

* DDV (suspenzijski test)

NAROČANJE

IZDELEK	PAKIRANJE	PRODAJNA ŠIFRA
Incidin™ Alcohol Wipe	6x100 robčkov flowpack	P309390
Incidin™ Alcohol Wipe	6x50 robčkov XL flowpack	P309394
Incidin™ Alcohol Wipe	6x90 robčkov doza	P309396
Incidin™ Alcohol Wipe	12x90 robčkov refill	P309398

PODROČJE UPORABE



Incidin™ Alcohol Wipe so pripravljeni robčki, za hitro in učinkovito razkuževanje medicinskih pripomočkov odpornih na alkohol ali drugih površin v zdravstvenih ustanovah.

NAVODILA ZA UPORABO

Z enim robčkom temeljito navlažite površino. Zagotovite stik s celotno površino. Pustite, da se posuši in ne izpirajte. Po uporabi zaprite pokrov.

Uporaba razkužilnih robčkov ne nadomesti rednega čiščenja.

SESTAVA

100g tekočine, s katero so prepojeni robčki, vsebuje: 35g 2-propanola in 25g 1-propanola

SKLADIŠČENJE

Proizvod je potrebno hraniti v hladnem in suhem prostoru, pri temperaturi, ki je nižja od 25°C, proč od neposredne sončne svetlobe. Izogniti se je treba ekstremnim temperaturnim nihanjem. Rok uporabe po odprtju je 2 meseca.

BIOCID UPORABLJAJTE VARNO. VEDNO PREBERITE ETIKETO IN PODATKE O PROIZVODU.

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO.

ECOLAB GmbH
Handelskai 92
1200 Wien
Austria



CE
0297

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB®

www.ecolab.com